


Таблиця перевірки зору
C901





Що нового?

- ★ 17-дюймовий світлодіодний екран із підсвічуванням
- ★ Новий комп'ютерний метод нейрокогнітивного тестування (CNT) - більш науковий, ефективний та направлений. Створюється крива CNT, що відображується на екрані після завершення тестування.
- ★ Зручніше для користувача - Всі іконки викладені у вихідному інтерфейсі.
- ★ Стилий перелік тестів--- Оберіть до десяти тестів, що використовуються найчастіше, та створіть власний стислий перелік тестів.
- ★ V - образне розташування оптотипів--- Уникнення оптотипів, що перевантажують екран.
- ★ Відмінне програмування дозволяє повною мірою використовувати усі особливості процесора.

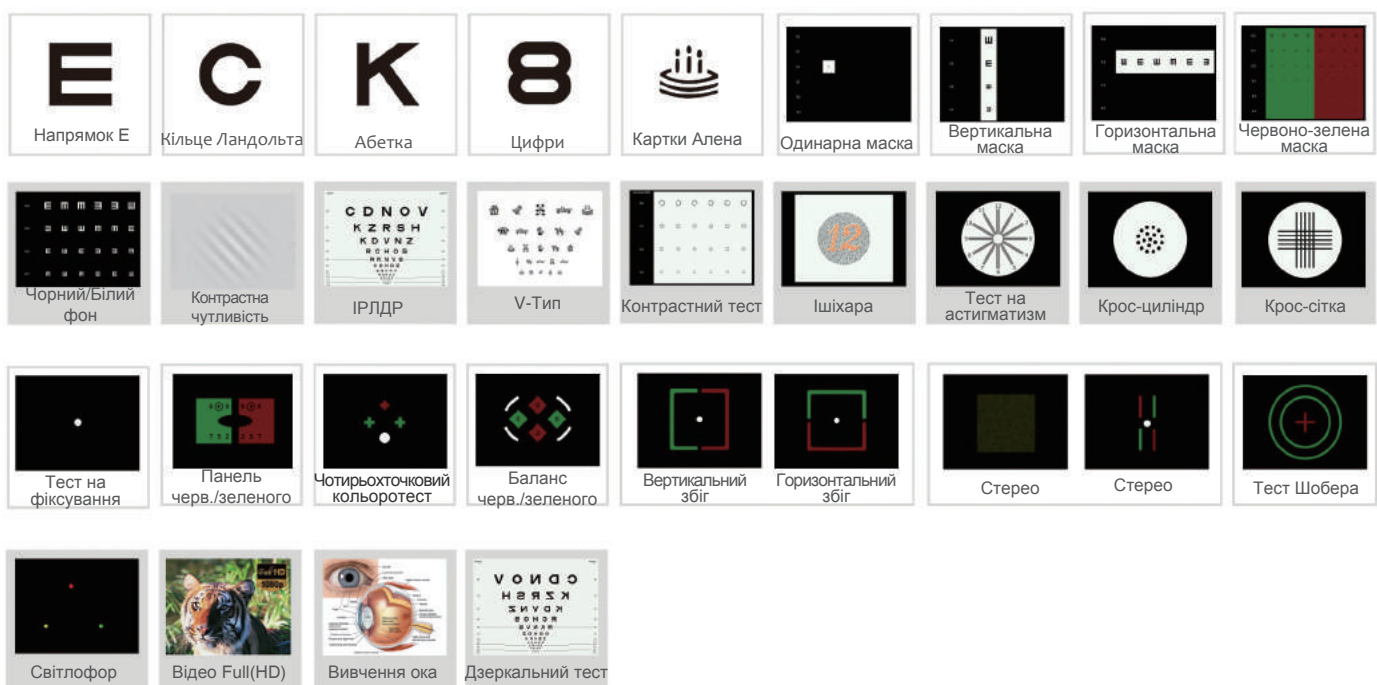

C901 встановлення розширених параметрів

Вбудоване ПЗ C901 розроблене на платформі Linux. Усі оптотипи та таблиці є векторною графікою.

Зміна параметрів,

Що робите Ви: Натисніть кнопку SET на пульті дистанційного управління.

Що робить C901: Міняє оптотипи та таблиці відповідно до визначених параметрів.

Три мови, наразі доступні Китайська, Англійська та Російська мови.

Робоча відстань може бути змінена відповідно до потреб користувача.

Багато блоків для зору, що відповідають різним параметрам оператора.

Вихід червоного та зеленого встановлюється у режимі реального часу, відповідно до клінічного стану.

Оборотні оптотипи та таблиці для дзеркальних кімнат.

Розмір зображення може бути змінено залежно від робочої відстані.

Доступні функції заставки та режиму очікування екрану.

Функція калібрування за гамма-випромінюванням забезпечує професійне вимірювання контрастної чутливості.

Безкоштовне оновлення Програмного забезпечення впродовж всього терміну роботи C901.



- ★ Два зовнішні порти C901 для під'єднання SD-карти та USB-флеш-накопичувача, дозволяють користувачеві

Запускати процес автоматичного оновлення.

Прогуляти відео (формати AVI, MKV та MP4.)



- ★ До стандартної комплектації C901 входить стіновий кронштейн, що дозволяє виконувати монтаж пристрою на стіні.



Характеристики

Екран	C901
Тип	17 дюймова панель XGA екран із світлодіодним підсвічуванням
Розділення	1280 x 1024 пікселів
Яскравість	>200кд/м ² (хв)
Таблиці	
Оптотипи	Е, С, Абетка, Цифри, Дитячий, картки Аллена (Звичайні та Розрізнені)
Тип маски	Зміна фону, Одинарна маска, Горизонтальна маска, Вертикальна маска, Червоно-зелена маска
Спеціальна таблиця	ІРЛДР, Контрастна чутливість, Контрастний тест, Ішіхара, Крос-циліндр, Тест на астигматизм, Крос-сітка, Тест на фіксацію, Стерео тест, Панель червоного/ зеленого, Чотирьохточковий кольоротест, Баланс червоного/ зеленого,Світлофор Горизонтальний збіг, Вертикальний збіг, Тест Шобера Таблиці для зору (Е, С, Абетка, Цифри, Дитячий, картки Аллена), Розрізнені Оптотипи
Інші функції	
Програвання відео, завантаження зображень, випадковий вибір оптотипів, що відображуються, дзеркальна функція, функція заставки та режиму очікування екрану.	
Одиниці зору	
Десяткові	0,05~2,0
По Снеллену (фт)	20/400~20/10
По Снеллену (м)	6/120~6/3
LogMar 5-ступеня	-0,3~1,3
нева	3,7~5,3
Робоча відстань	
2 м ~7 м (кроком у 0,1 м) 6 фт -24 фт (кроком у 0,5 фт)	
Таблиця перевірки зору 0,4 м~1,5 м, кроком у 0,1 м	
Джерело живлення	
Подача	100-240 В ЗС,60/50 Гц
Споживання	20 Ватт (max)
Пульт дистанційного керування	
Інфра-червоний, дистанційного керування, батарейки 2*AA	
Упаковка	
Розмір	540 мм x 420 мм x 250 мм (Д/Ш/В)
Нетто вага	3,6 кг
Стандартне обладнання	



Пульт дистанційного керування



Червоно-зелені окуляри



Картки оптотипу



Стіновий кронштейн



Адаптер змінного струму



Силовий кабель

Додаткове обладнання



Настільна підставка



Підлогова стійка



Відповідає вимогам FDA

Shanghai MediWorks Precision Instruments Co.,Ltd.

Адреса:Zone A,2nd Floor,No.69,Lane 1985,Chunshen Road,Minhang District, Шанхай,200237, Китай

Тел.: +86-21-54260421 54260423 Факс:+86-21-54260425

Email: international@mediworks.biz

Приєднуйтеся до нас:



www.mediworks.biz

201608В *Зовнішній вигляд та характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення (* Таблиця є додатковою)

Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні

ТОВ "АЙ ПІ МЕДІКАЛ", м.Харків

Телефон 057 750 88 14 067 7184906

e-mail: office@ipmedical.com.ua www.ipmedical.com.ua

Різниця у деталях