



BioDrop MD[®] PLUS

інтенсивни зволожуючі краплі для сухих очей без консервантів

PIILOSET[®]

® Plus

Інтенсивне зволоження без консервантів

BioDrop MD® Plus - це інтенсивний зволожувач без консервантів, призначений для полегшення помірних і важких симптомів сухого ока.

Ефективна комбінація гіалуронану і трегалози

Натуральні активні речовини BioDrop MD® Plus гіалуронан і трегалоза разом забезпечують зволоження, змащення та стабілізацію слізної плівки, захищаючи око від висихання та пошкодження клітин.

Молекулярна маса та концентрація гіалуронану відіграють вирішальну роль при дослідженні мукоадгезії очних крапель.

Високомолекулярний гіалуронан у високій концентрації 0,25% забезпечує чудову мукоадгезію та високий зволожуючий ефект BioDrop MD® Plus.

Трегалоза діє як осмопротектор, тобто захищає від осмотичних змін; стабілізує клітинні мембрани, білки та ДНК, крім того, захищає епітеліальні клітини поверхні ока від пошкодження та збільшує товщину слізної плівки.

Застосування

Рекомендоване добове дозування 1-2 краплі 1-3 рази на день, залежно від симптомів. BioDrop MD® Plus ідеально підходить для користувачів нічних контактних лінз, як інтенсивний зволожувач.

Текстура BioDrop MD® Plus дуже приємна для очей; не надто густа і гелеподібна, крім того, вона не затуманює зір.

Високомолекулярний
гіалуронан у високій
концентрації

Зволожує,
змащує та
стабілізує слізну
плівку

Трегалоза
захищає від
осмотичного
стресу

Без консервантів

BioDrop MD® Plus доступний у спеціальному, стерильному, мультидозовому дозатору 10 мл. Завдяки вдосконаленому механізму дозатора, консерванти не потрібні. вдосконалений механізм дозування, не потрібні консерванти. Механізм ущільнення наконечника закриває отвір отвір негайно закривається при знятті тиску, таким чином запобігаючи забрудненню через наконечник. Необхідне компенсаційне повітря необхідне компенсаційне повітря фільтрується через багатошарову мембрану. Дозатор м'який і зручний у використанні, крім того, краплі подаються плавно. На додаток до вкладиша всередині ковпачка, захисний клапан фільтра запобігає засміченню наконечника. Важливо одразу ж закрутити кришечку на флакон після того, як закапування очних крапель.



Склад

2,0% трегалози, 0,25% гіалуронану в стерильному ізотонічному буферному розчині з низьким вмістом фосфатів.

BioDrop MD® Plus не містить інгредієнтів, що зазвичай викликають подразнення, консервантів та матеріалів тваринного походження, є одним з продуктів Finnsusp з маркуванням Allergy Label, який підходить також для чутливих очей.

Зберігання

Вжити протягом 6 місяців з моменту відкриття. Зберігати при температурі +15-30 °C



BioDrop MD® Plus, розроблений і виготовлений у Фінляндії, є медичним продуктом, який підходить усім із сухими очима.

PIILOSET BioDrop MD

Finnsusp Oy | Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto, Finland | Tel +358 2 489 110 | info@finnsusp.fi | www.finnsusp.fi

